



clinigo[®]

MANUAL DE UTILIZADOR

Toalhitas Desinfectantes Universal

Toalhitas de limpeza descartáveis para desinfetar superfícies e dispositivos médicos não invasivos



V2 IFU 22 October 2025

Toalhitas Desinfectantes Universal

50
WIPES

100
WIPES

200
WIPES

IDEAL PARA UTILIZAÇÃO EM HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE.

Toalhitas húmidas 2 em 1, de utilização única e prontas a usar, para limpeza e desinfecção numa única etapa de superfícies não porosas e dispositivos médicos não invasivos em ambientes de cuidados de saúde. As toalhitas destinam-se a ser utilizados por profissionais de saúde para reduzir a contaminação microbiana (incluindo bactérias, fungos e vírus), auxiliando assim nos protocolos de controlo e prevenção de infeções.

OS ESSENCIAS

- Bactericida
- Tuberculicida
- Virucida
- Fungicida
- Antifúngico
- Sem álcool
- Pronto a usar
- Suave para superfícies

MATERIAIS COMPATÍVEIS

- **Compatibilidade com materiais comuns de equipamentos de saúde, tais como:**
- Polycarbonate
- Acrylonitrile Butadine Styrene (ABS)
- Polymethyl Methacrylate (PMMA) (Acrylic)
- High Density Polyethylene (HDPE)
- Polypropylene
- Stainless Steel

IDEAL PARA

- Limpeza e desinfecção eficazes num curto tempo de contacto
- Desinfecção intermédia onde existe infeção conhecida ou risco de infeção*
- Todos os ambientes de saúde; disponível em embalagens flow pack
- Desinfecção de superfícies de dispositivos e equipamentos médicos não invasivos

***Não indicado para esterilização de fase final do dispositivo medico**

INGREDIENTES

< 5% Non-ionic Surfactants,
< 5% Cationic Surfactants,
Disinfectant, Parfum.


SUBSTÂNCIA ACTIVA POR 100 GRAMAS DE PRODUTO

Didecyldimethylammonium chloride (DDAC) 0.86g/100g,
Alkyl (C12-16) dimethylbenzyl ammonium chloride (ADBAC/BKC (C12-16)) 0.8g/100g,
N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1, 3-diamine (Diamine) 0.7g/100g).

CLINICAMENTE TESTADO

CLINICALLY PROVEN TO KILL 99.99% OF GERMS.

- Including:
- Norovirus
 - Coronavirus
 - MRSA | VRE | CRE
 - + many more

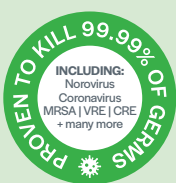

Saraco Industries Ltd

Egerton Street, Farnworth

Bolton BL4 7ER

United Kingdom

T : +44 (0) 870 803 3979 UK

Toalhitas Desinfectantes Universal

50
WIPES

100
WIPES

200
WIPES

MODO DE UTILIZAÇÃO E CONTRAINDICAÇÕES

Use luvas e EPI adequados. Deite as toalhitas húmidas e abra-o completamente para limpar a superfície. Limpe a superfície com movimentos em forma de "S", de cima para baixo. Para garantir que a superfície se mantém húmida durante o tempo de contacto necessário, se necessário, utilize toalhitas adicionais. Deixe a superfície secar naturalmente ao ar antes de utilizar.

CONTRA-INDICAÇÕES

Não utilize toalhitas húmidas para a esterilização final de dispositivos médicos.


PRIMEIRO PASSO

- Utilize luvas e EPI adequados
- Siga a política de avaliação de riscos da sua organização quando utilizar EPI



SEGUNDO PASSO

- Abra a tampa e a etiqueta
- Retire o toalhete humedecido
- Feche a tampa para voltar a selar a embalagem

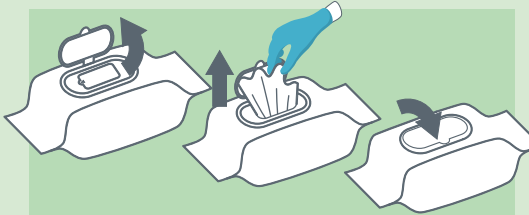

TERCEIRO PASSO

- Limpe a superfície com movimentos em forma de "S", trabalhando das zonas limpas para as sujas.
- Mantenha o pano esticado (não amarrotado) para garantir uma cobertura total da superfície.
- Evite limpar a mesma área duas vezes.



QUARTO PASSO

- Deite a toalhita no recipiente apropriado.
- Não reutilize as toalhitas húmidas.
- Deixe a superfície secar naturalmente antes de utilizar.
- Deixe a superfície em contacto durante o tempo indicado.



UTILIZE OS BIOCIDAS COM PRECAUÇÃO

Leia sempre o rótulo e as informações do produto antes de utilizar.

A reutilização dos toalhetes aumenta o risco de infeção; deite fora cada toalhete após uma única utilização.

APENAS PARA USO PROFISSIONAL

AVISOS

- Nocivo para a vida aquática, com efeitos de longa duração.
- Manter fora do alcance das crianças.
- Evite a libertação para o ambiente.
- Elimine o conteúdo/recipiente numa instalação autorizada, em conformidade com a regulamentação nacional.
- Leia sempre o rótulo antes de utilizar. Utilize os biocidas de forma segura e sustentável; este produto deve ser utilizado de acordo com as instruções do rótulo.
- Lave bem as mãos após a utilização.
- Se ocorrer irritação, interrompa imediatamente a utilização e lave com água limpa; se os sintomas persistirem, consulte um médico
- Não utilizar com outros produtos de limpeza
- Não se destina à limpeza da pele nem a qualquer outro uso pessoal
- Não deite na sanita.

COMO COMUNICAR UM CASO DE INTOXICAÇÃO

Caso ocorra um incidente grave relacionado com este dispositivo, o utilizador deve comunicá-lo ao fabricante e à autoridade competente do Estado-Membro onde se encontra estabelecido.

**National Poisons
Information Centre**
(01 8092166) (IRE)
8am-10pm every day.

For Safety Data Information
(medical personnel only)
T: 08708033979 (UK).



Saraco Industries Ltd

Egerton Street, Farnworth
Bolton BL4 7ER
United Kingdom
T : +44 (0) 870 803 3979 UK

Toalhitas Desinfectantes Universal

50
WIPES

100
WIPES

200
WIPES

DETALHES SOBRE A EFICÁCIA

O líquido extraído das toalhitas húmidas foi testado de acordo com as normas: EN16615, EN14476, EN13727, EN13624, EN14348 e EN14562 em condições de sujidade.

EFICAZ CONTRA	TESTE*	TEMPO DE CONTATO (SEGUNDOS)
BACTERICIDAL		
Escherichia coli	EN 13727	30
Carbapenem-Resistant	EN 13727	60
Enterobacteriaceae (CRE)	EN 16615	30
Vancomycin-Resistant	EN 13727	30
Enterococci (VRE)	EN 16615	30
Enterococcus hirae	EN 13727	30
	EN 16615	30
Klebsiella pneumoniae	EN 13727	30
	EN 16615	30
Pseudomonas aeruginosa	EN 13727	30
	EN 16615	30
Methicillin-resistant	EN 13727	60
S. aureus (MRSA)	EN 16615	30
Staphylococcus aureus	EN 13727	30
	EN 16615	30
MYCOBACTERICIDAL		
Mycobacterium avium	EN 14348	120
Mycobacterium terrae	EN 14348	60
VIRUCIDAL		
Murine norovirus	EN 14476	30
Vaccinia virus	EN 14476	15
Hepatitis B Virus (HBV)	EN 14476	15
Hepatitis C Virus (HCV)	EN 14476	15
Influenza Virus	EN 14476	15
Coronavirus (SARS, MERS)	EN 14476	15
Human Immunodeficiency Virus (HIV)	EN 14476	15
YEASTICIDAL		
Candida albicans	EN 13624	60
	EN 16615	30
	EN 14562	120
Candida auris	EN 16615	60

*TESTADO EM CONDIÇÕES DE SUJIDADE

SÍMBOLOS DE EMBALAGEM



Não reutilize as toalhitas húmidas



Deite a toalhita húmida no lixo apropriado.



Utilizar a embalagem até 2 meses após a abertura.



Conservar em local fresco e seco, ao abrigo da luz solar direta.



Limites de temperatura para transporte e manuseamento.



REF CU8690



MD UFI: XT70-D0GM-R00D-87T7



Disponível em:
www.avrahealthcare.com

PARA INFORMAÇÃO

DADOS CLÍNICOS DE SEGURANÇA
(pessoal clínico apenas)
T: 08708033979 (UK).



Saraco Industries Ltd

Egerton Street, Farnworth

Bolton BL4 7ER

United Kingdom

T : +44 (0) 870 803 3979 UK

Toalhitas Desinfectantes Universal

50
WIPES

100
WIPES

200
WIPES

PRODUTOS DA MESMA GAMA

50 Toalhitas Desinfetantes Clínicos Universais

Dimensões:	200 x 200 mm
Material:	30gsm
Embalagens (por caixa):	24
Código do Produto:	CU8676
Código de Barras:	5060110228676

50
WIPES



100 Toalhitas Desinfetantes Clínicos Universais

Dimensões:	200 x 200 mm
Material:	30gsm
Embalagens (por caixa):	12
Código do Produto:	CU8683
Código de Barras:	5060110228683

100
WIPES



200 Toalhitas Desinfetantes Clínicos Universais

Dimensões:	200 x 270 mm
Material:	30gsm
Embalagens (por caixa):	6
Código do Produto:	CU8690
Código de Barras:	5060110228690

200
WIPES



Saraco Industries Ltd
Egerton Street, Farnworth
Bolton BL4 7ER
United Kingdom
T : +44 (0) 870 803 3979 UK